

バキュームアダプター

【禁忌・禁止】

- ヒーター部は高熱に達する為、ハウジング部に直接触れると火傷の可能性がある。
- 当品の周囲には、可燃性のものは置かないこと。
- 電源コード接続時は必ずアースをとること。

【形状・構造及び原理等】

主な構成



- ① ヒーター部ハウジング
- ② ジスクをはさむフレーム部
- ③ 模型設置台
- ④ 真空ポンプ内臓
- ⑤ ヒーター/OFF/バキュームスイッチ

規格

定格電源電圧	AC110V
定格電源周波数	50/60Hz
定格消費電力	1475W

【使用目的又は効果】

マウスガード、スポーツガード、ブラキシズムプリント、個人トレー等を製作する時に用いる装置。熱可塑性ジスクを加熱して軟化させ、石膏模型にかぶせて吸引することにより成形する。

【使用方法等】

取扱説明書に従い、次の順序で行う。

- (1) 本体の電源コードの接続を行う。同時に、アースを必ずとること。
- (2) 準備した石膏模型を模型設置台の中心部に置く。
- (3) ジスクをはさむフレームに、必要なジスクをはさんで固定した後、ヒーター部ハウジングの方に上昇させ、固定する。
- (4) ヒータースイッチを入れる。

- (5) ジスクが適度に軟化したら、バキュームスイッチを入れ、フレーム部を下降させて模型に圧接する。
- (6) ヒータースイッチを切る。
- (7) 軟化したジスクがバキュームで十分圧接されるのを確認した後、バキュームスイッチを切る。
- (8) 適度に時間をおいた後、フレームからジスクの圧接された模型を取りはずす。
- (9) 模型をジスクからはずし、適度にジスクをトリミングし最後仕上げをする。

【使用上の注意】

- (1) 使用方法は、必ず使用説明書を熟読して行うこと。不明な点がある時は、必ず輸入元に問い合わせること。
- (2) 当バキュームアダプターを使用する場所が、当消費電力を十分まかなえる容量を備えていることを確認すること。
- (3) 加熱部分には十分注意して取り扱うこと。火傷をおった時は、速やかに医師の治療を受けること。
- (4) 機器を落下させたり、破損が生じるようなことがあった場合、自分で修理をしてはならない。
- (5) 必ず輸入元に戻し、再検査後の合格品を使用すること。
- (6) 機器を作業中に、異常音、異常熱が認められた時、機器の作動はすみやかに中止すること。
- (7) ヒーターの操作は5分以内に抑えること。ヒーターの操作最大時間は5分のため、5分を超える操作は故障の原因になります。
- (8) バキュームの操作は1分以内に抑えること。バキュームの操作最大時間は1分のため、1分を超える操作は故障の原因になります。
- (9) 電源コードの過度の加熱を避けるため、ヒーターの電源をオフにしてからヒーターユニットを背面へ回転すること。
- (10) 熱による破損の恐れがあるもの(ガラス等)、可燃性があるものの側での使用はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 耐用年数: 5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社
TEL: 052-799-4075
FAX: 052-353-6610

製造業者: キーストンインダストリーズ社
KEYSTONE Industries
アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください