

## コーピング


### 【禁忌・禁止】

1. 歯科用以外の用途には使用しないこと。
2. 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

成分

ポリプロピレン

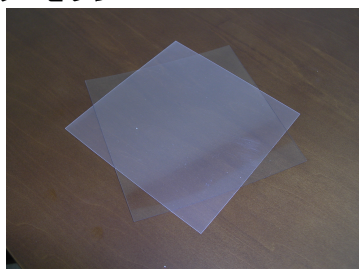

サイズ	127 × 127mm
厚さ	0.5mm
カラー	乳白色

### 【使用目的又は効果】

1. 使用目的・用途  
歯牙の咬合面を被覆するための硬質ディスク。吸引型の成型機等を使って歯牙に合うように整形する。転位歯又は動揺歯の位置の保持、クレンジング(噛みしめ癖)や歯ぎしりとその後遺症の治療、及び筋肉又は顎関節の疼痛、例えば顎関節症に対する暫間的な除痛に使用する。
2. 使用する器械の種類  
加熱吸引成型器(バキュームアダプター)

### 【使用方法等】

1. 加熱吸引成型器のジスクホルダーにコーピングをセットして、ヒータで加熱する。
2. 加熱吸引成型器の吸引口に石膏模型をセットする。
3. コーピングが軟化されて垂れ下がってくる。
4. ジスクホルダーを持って、コーピングを下に下げて石膏模型に圧接し、吸引モーターを回転させる。(吸引時間は約30秒)
5. 吸引終了後、約一分ぐらい経ったら、ジスクホルダーからコーピングを外し、石膏模型とともに冷水に入れて硬化させる。
6. コーピングから石膏模型を外す。

### 【使用上の注意】

1. コーピングは吸引成型器にて製作中、高温になるので火傷等に注意すること。
2. コーピングの薄い板は、角等で指を切る恐れがあるため、注意すること。
3. 使用する加熱吸引成型器の添付文書、あるいは仕様説明書を熟読したあと、正しく器具に装着すること。
4. 使用する前に、当材料に変形、ゆがみ、かび等の異常がないことを確認してから使用すること。
5. 歯科用以外の用途には使用しないこと。
6. 本材の使用により発疹などの過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 本材は、湿気の無い場所にて密閉した状態にて保管すること。
2. 直射日光の当たる場所は避けること。
3. 児童の手の届かない場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社  
TEL: 052-799-4075  
FAX: 052-353-6610

製造業者: キーストンインダストリーズ社  
Keystone Industries  
アメリカ合衆国