

マンドレル

【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに洗浄と滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。

【形状・構造等及び原理等】

1. 形状



2. 成分

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

研削砥石、研磨ディスク、丸のこ、ドリルビット、旋盤の主軸台等の回転式歯科用切断器具や、研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持するシャフトをいう。

軸部、ヘッド部の形状によって数種類存在する。

【使用方法等】

1. 滅菌され清浄な状態であることを確認する。
2. キズ、変形の有無などが無いことを確認する。
3. ハンドピースに装着して使用する。

【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。
5. 装着するハンドピースの回転数を厳守し、決してそれ以上の回転数で使用しないこと。ただし、個別に表示・指定されている製品については、その表示された最大回転数を超えないこと。
6. 装着時は器具メーカーの指示に従い、底部まで確実に挿入し、正しくチャックをしめること。
7. あらかじめ口腔外で回転させ、異常やブレがないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- ・ もらいさびが発生する恐れがあるため、さびている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品といっしょに収納・保管しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

- ・ 使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とした後、高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌などの滅菌処理を完全に行い、滅菌されたことを確認すること。
- ・ 家庭用洗剤や機能水（超酸化水）等は金属を腐食させることがあるので使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL： 052-799-4075

FAX： 052-353-6610

製造業者：エデンタ社

Edenta Etablissement

スイス