


プロフィールカップ

【禁忌・禁止】

- 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。
- 使用ハンドピースに正しく装着、固定しないときは使用しないこと。
- スクリュータイプにアタッチメント等を取付し、コントラタイプとして使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 主な構成と主原料

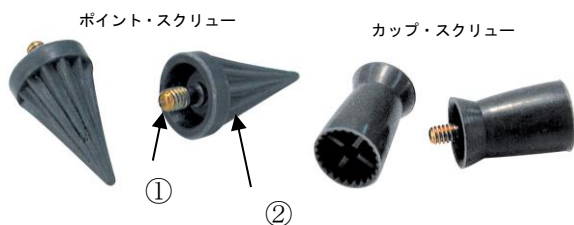

- ① 軸部: スチール
② 研磨部: シリコンラバー

【使用目的又は効果】

歯科予防(清掃)時に研磨材を適用するために用いる、通常、ゴム製の器具をいう。本品は歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を歯に適用する。

【使用方法等】

ハンドピース(スクリュータイプ)に装着して、歯を研磨する時に使用する。

プロフィール専用の研磨剤と併用して使用する。

ポイントスクリュー

直径	0.6 cm
全長	1.3 cm

カップ・スクリュー

直径	0.6 cm	※円錐形
全長	1.5 cm	

【使用上の注意】

1. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
2. 本品の使用は、歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
3. 使用前に予備回転を行い、揺れが無いことを確認すること。
4. 落下・誤飲に注意すること。
5. 指定の回転数を超過して使用しないこと。
回転数: 10,000rpm 以下
6. ハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクの奥まで確実に挿入し、半チャックになっていないことを確認すること。
7. 使用前に予備回転を行い、振れないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: ペンリン社

Peng Lim Enterprise Co., Ltd.

台湾