

オートシリコンディスペンサー

【禁忌・禁止】

1. 歯科技工以外には使用しないこと。
2. 機器に破損、劣化、異常が認められた時は使用を中止すること。
3. 機器の形態変更や、改造を行わないこと。

【使用上の注意】

1. 使用方法は、必ず使用説明書を熟読して行うこと。
2. 保護キャップを取り外して、再利用しないこと。
3. 安定した平らな場所で使用すること。
4. 濡れた手でプラグに触れないこと。

【形状・構造及び原理等】

主な構成



- ① 本器
- ② ミキシングチップ取付口(練和材取出し口)
- ③ ON/OFF ボタン
- ④ 電源スイッチ

【保管方法及び有効期間等】

1. 通気性の良い、汚染、破損を受けない場所に保管すること。
2. 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
3. 耐用年数: 6年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075

FAX: 052-353-6610

製造業者: シラデント社

SILADENT Dr Boehme & Schoeps GmbH

ドイツ

形状

寸法: H: 310 × W: 290 × D: 450 mm

重量: 12.5kg

電氣的定格

定格電源電圧 100V

定格電源周波数 50/60Hz

【使用目的又は効果】

歯科技工用複模型用印象材料を練和または混和する機器である。

【使用方法等】

取扱説明書に従い、次の順序で行う。

- (1) 電源コードをコンセントにつないで下さい。
- (2) 専用キャップをシリコン材(ボトル)に取付け、本器に接続して下さい。
- (3) 電源スイッチを押し電源を入れて下さい。
- (4) ミキシングチップを取付けて下さい。
- (5) 練和材取出し口下に受け皿・ボウルなどを用意して下さい。
- (6) ON/OFF ボタンを押し、練和された印象材を使用して下さい。

取扱説明書を必ずご参照ください。