

キーストン プロフィーラクシペースト

【禁忌・禁止】

- 本品又は本品に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎などの過敏症のある患者には使用しないこと。
- 歯科用以外の用途には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状 : ペースト状 (外觀図は下記)



2. 成分

グリセリン、フッ化ナトリウム、水、他

3. 性状

本品はペースト状でフレーバー(香り)がある。

【使用目的又は効果】

歯磨きカップ等を用いて、本品を使用し歯面や補綴物表面を研磨する。

カラー	粗さ
ブルー	極粗目
ピンク	粗目
グリーン	中目
ブラウン	細目

Ph: 6~8

【使用方法等】

本品を研磨カップ等に適量塗布し、歯面や補綴物表面の研磨を行う。

【使用方法に関する使用上の注意】

- 術者は保護眼鏡やグローブ等をしようすること。
- 歯磨きカップに使用する歯科用駆動装置及びハンドピース等については、各メーカーの指示に従い、正しく使用すること。

【使用上の注意】

- 本品が眼に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 本品の大量摂取は、吐き気、嘔吐、頭痛、めまいを起こす原因になる為、注意すること。もし大量に誤飲してしまった場合、牛乳もしくは水を飲んで速やかに医師の診断を受けること。
- 本品又は本品に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎などの過敏症のある患者には使用しないこと。
- 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 常温・常室で保管すること。
- 児童の手の届かない場所に保管すること。
- 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【使用期限】

本品は包装ラベルに記載の使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 名南歯科貿易株式会社
TEL: 052-799-4075
FAX: 052-353-6610

製造業者: キーストンインダストリーズ社
Keystone Industries
アメリカ合衆国