

エンドブラック ルートチャンネルセラピーキット

【禁忌・禁止】

1. 免許を持った歯科医師のみが使用すること。
2. 使用目的に応じて使用すること。
3. 患者ごとに滅菌して使用すること。
4. 本品に感作、アレルギーの症状を呈する時は使用しないこと。



エンドファイルスタンド



ステンレスケース

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



エクスペローラー



プローブ



ミラーホルダー



サーフェスマirror



ピンセット



デンタルシザー



エキスカベーター



プラグー



スパチュラ



ラバーダムフレーム

	構成医療機器である既製造販売届出医療機器の名称		製造販売届出番号	製造販売業者名
	一般的名称	販売名		
1	歯科用探針	コーラーエクスペローラー	23B2X10023000402	名南歯科貿易株式会社
2	歯周ポケットプローブ	コーラープローブ	23B2X10023000403	名南歯科貿易株式会社
3	歯鏡	コーラーミラーホルダー	23B2X10023000408	名南歯科貿易株式会社
4	歯鏡	コーラーサーフェスマirror	23B2X10023000404	名南歯科貿易株式会社
4	ピンセット	ピンセット	23B2X10023000327	名南歯科貿易株式会社
5	歯科用歯肉はさみ	デンタルシザー	23B2X10023000329	名南歯科貿易株式会社
6	歯科用エキスカベーター	コーラーエキスカベーター	23B2X10023000405	名南歯科貿易株式会社
7	歯科用根管プラグー	コーラープラグー	23B2X10023000406	名南歯科貿易株式会社
8	歯科用練成へら	コーラースパチュラ	23B2X10023000407	名南歯科貿易株式会社
9	歯科用ラバーダムフレーム	コーラーラバーダムフレーム	23B2X10023000419	名南歯科貿易株式会社

【使用目的又は効果】

根幹治療を進めるにあたり、適切な処置・診療方法を診断するためのインストゥルメントキット。
迅速な処置、利便性を高めるため、キットとしての組み合わせを必要としている。

各構成医療機器の使用目的又は効果

[エクスプローラー]

歯科診療用で触診等に用いる手持型の器具（プローブ）をいう。軸の先端の細い作業部分は用途に応じて針状又は鉤型のもの、または鈍的形のものがある。

[プローブ]

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定するために用いる歯科手術用器具

[ミラーホルダー]

口腔内診査又は下・粘膜等の圧排のためにもちいる器具。

ミラーハンドルとして使用する

[サーフェスマirror]

口腔内で歯を見るために用いる歯科用鏡

[ピンセット]

保持する物体を閉じて挟む2枚の刃をもつ手術器具。

ハンドルは永久的に結合している。

[デンタルシザー]

通常、手術時の組織、布、縫糸等の切断に用いる器具。

回転軸のある2枚の刃からなり、切断する材料の上で2枚の刃を閉じることによって操作する。

歯科手術用に特別に設計された器具。

[エキスカベーター]

歯の齶蝕象牙質の切断及び除去のために用いる、カーブのついた切刃をもつ手持型歯科用器具。

[プラグー]

円柱状又は先細の作業部分をもち、横断面が円形で先端が平坦な歯科用器具。根管に充填物を主に軸方向に充填することに用いる。

[スパチュラ]

歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するへら状の器具。

[ラバーダムフレーム]

術野に到達しやすくするためにラバーダムを延伸した状態で保持する柔軟なフレーム。

【使用方法等】

各器具、滅菌され清浄な状態であることを確認する。

キズ、変形の有無、ジョイント部の動きなどに異常がないことを確認する。

根幹治療を進めるにあたり、ミラー、エクスプローラー他各器具を用いて診断を進める。

【使用上の注意】

1. 感染防止の為、オートクレーブ滅菌などの確認をしてから使用すること。
2. 落下に注意すること。
3. 損傷、変形、劣化、さびの認められるものは使用しないこと。
4. 滅菌消毒の方法は、それぞれの滅菌器、消毒液のメーカーの使用説明書に従って、正しく行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

滅菌した商品は化学薬品を避けて埃のない清潔で乾燥した場所で保管してください。

一定の温度で直射日光を避け保管してください。

【保守・点検に係わる事項】

[オートクレーブ]

温度；最低134℃ 最高137℃

最短保持時間：4分以上

乾燥：10分以上

※スタンドは低温滅菌

使用後は、速やかに本品に付着した異物を完全に洗い落とし、滅菌処理を実施し、しっかりと乾燥されたことを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL：052-799-4075 FAX：052-353-6610

製造業者：コーラー社

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG

ドイツ