

パットカム プレミアム

【警告】


- 必ず専用のディスポカバーを取り付けて使用すること。(感染予防、損傷による部品の誤飲防止の為)
- ディスポカバーは使用前、破れていないことを確認すること。
- 使用中、カメラ先端を患者が強く噛まないように注意すること。

【禁忌・禁止】


- ディスポカバーは、患者ごとに交換し、繰り返し使用しないこと。(再使用禁止)

【形状・構造及び原理等】

主な構成

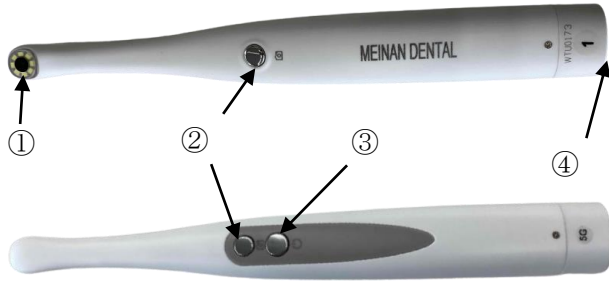

- ① レンズ
- ② シャッター/保存
- ③ パワー (ON/OFF)
- ④ USB 電源プラグ

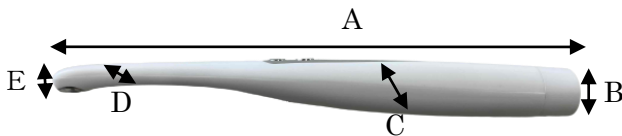

寸法 : A(220)×B(20)×C(25)×D(12)×E(10)mm
重さ : 60 g
解像度 : 1920×1080pixel
防水規格 : IPX5
ライト : 8pcs 白色 LED
カメラ : 1/2.8" CMOS
接続方法 : Wifi 5G
焦点距離 : 10~30 mm

【使用目的又は効果】

口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用する装置。

【使用方法等】

使用方法

- 端末の準備
端末へ専用のソフトをインストールする。
- 本器のパワースイッチを2秒間押します。緑のランプが付きレンズのライトが光ります。
- 端末と本器のWifiをコネク特させます。
- 接続完了後、撮影箇所(口腔内)を撮影・記録します。

【使用上の注意】

- 使用方法は、必ず使用説明書を熟読して行うこと。
- 機器の作業中・充電中に、異常音、異常熱、発煙、変形、変色が認められた時は、安全を考慮し機器の作動はすみやかに中止すること。
- 機器の破損が生じる恐れのある、粗雑な取扱いをしないこと。
- 落下などの機器に強い衝撃、振動を与えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分を含んだ空気などにより悪影響の生じるおそれのない場所に保管すること。またそのような場所で充電をしないこと。
- 傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意して保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 内臓電池は消耗品のため、充電を繰り返すことで、使用可能時間が短くなります。
- 充電しながら長時間使用すると、内臓電池の寿命が短くなります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 名南歯科貿易株式会社

TEL : 052-799-4075

FAX : 052-353-6610

製造業者 : MLG Medical Instrument (Shenzhen) CO., LTD

中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照下さい。