

シャドーレスルーペⅡ

【禁忌・禁止】

- 太陽や強力な光源を直視しないこと。（視力障害になる可能性があるため）

【形状・構造及び原理】

1. 形状・構造



①	ヘッドライト
②	ルーペ
③	テレスコープ
④	リチウム電池
⑤	充電アダプター
⑥	レジンフィルター

【原理】

眼鏡レンズ部又は、眼鏡フレーム部に装着したルーペを通して作業野を拡大して観察する。

明るさ	5000K
満充電	6h (Max 光度)
重量	115g
レンズ(ルーペ)	倍率最大：1.5倍

作業距離	30-80cm (2.5倍時) / 25-35cm (5.0倍時) ※倍率によって作業距離は変化します。
拡大鏡	2.5-5.0倍

※テレスコープ

【使用方法等】

1. 光源用のリチウム電池を充電させます。
2. 充電させた、リチウム電池をヘッドライトのバッテリーBOXに装着させます。
3. ライトをつける場合、ヘッドライトのスイッチを入れてライトをつけます。
4. テレスコープをヘッドライトに装着させます。※必要であれば、レジンフィルターを取り付けます。
5. 装着感を確認し、ズレがないようにフィットさせます。
6. 補綴物などを利用し、焦点を合わせ、作業距離を確認します。

【使用上の注意】

1. 取扱い説明書は参照すること。
2. テレスコープ・ルーペは推奨ものを使用すること。
3. テレスコープ・ルーペを使用し、太陽や光源の強いものを覗かないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温となる場所(暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など)に放置しないこと。
2. 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管理すること。
3. 耐用年数：5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：名南歯科貿易株式会社

TEL：052-799-4075

FAX：052-353-6610

外国製造業者：ShenZhen JinDaiFu Instrument co.Ltd

製造先国名：中華人民共和国

【使用目的又は効果】

歯科手術、検査、処置及び歯科技工作業時に術者の小型望遠鏡として機能し、作業野拡大像を得る。