

ご使用前に、必ずこの添付説明書きをよく読んでください。また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

一般医療機器 医療用洗浄器 鼻用洗浄器 JMDNコード 41599000

ドライノーズスプレー®

【成分】

- 成分: 塩化ナトリウム、塩化ベンザルコニウム(保存剤)、精製水
- 内容量: 20mL 1日3~4回使用して約1ヵ月分

【効果】

空気が乾燥してくると鼻の中もカサカサした状態になり乾燥感・ムズムズ感が発生します。このような状態をドライノーズといっています。鼻水がカサブタ状に固まる前の早めのドライノーズスプレーのご使用が効果的です。

【用途】


- 閉めきったオフィス・マンション・ホテル・飛行機内・新幹線での鼻の中のカサカサした乾燥感の洗浄
- 鼻の中のムズムズ感の洗浄
- 鼻水がカサブタ状に固まる前の洗浄
- 鼻に入った花粉や水泳後の鼻の中の洗浄

【特長】

- 無臭、アルコール・メントールなどの刺激成分無配合。
- 1日何回でも使えます。
- サラッとした使用感。特別なお薬を含みません。
- 携帯しやすいコンパクトサイズ。
- スプレーの先端部は丸みを付けた安全設計。細かい霧状でスプレーされます。
- 妊娠・授乳期の方やお子さまにも使えます。

【使用方法】

1. 青色のキャップをはずします。
2. 容器を立て鼻の中にノズルの先を入れ、容器の中央部を手ではさむように強く押すとスプレーされます。液が鼻から流れ落ちますのでティッシュ・ハンカチなどで押えてご使用下さい。左右それぞれ1回ずつスプレーして下さい。1日何回でも使えます。
3. スプレー後は鼻を軽くかんで下さい。

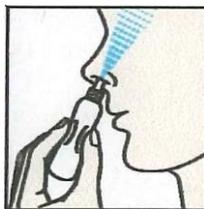

【使用上の注意】

- 鼻の中の乾燥症状がすすんで発生したカサブタ・出血・ただれには効きません。
- スプレー後は、ノズルの先を鼻の中から外に出してから指の力をゆるめて下さい。鼻の中に入れてまま指の力をゆるめると、鼻水等が容器の中に逆流することがあります。
- 容器を振る必要はありません。
- 開封後は早めに使い切ってください。
- 目や耳に使用しないで下さい。
- 衣服などが濡れないようご注意ください。



- 耳鼻咽喉科などで治療を受けている方は使用前に医師に相談して下さい。
- 症状が改善されない時や万一異常が発生した場合は医師又は薬剤師にご相談下さい。
- 小児に使用させる場合は保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光や高温の場所を避け、涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になったり品質が変わることがあります。
- 他の人と共用しないで下さい。
- 液を霧状でスプレーするため容器の約半分は空間になっていますが、洗浄液は20mL入っています。
- 使用期限を過ぎた洗浄液は使用しないで下さい。

【製造販売業者及び販売業者の氏名又は名称及び住所】

販売 **日本臓器製薬**
大阪市中央区平野町4丁目2番3号
お客様相談窓口 ☎06-6222-0441
土・日・祝日を除く 9:00~17:00

製造販売元
明星産商株式会社
高知県南国市岡豊町八幡411番地1
088-804-8111