

機械器具（74）医薬品注入器
一般医療機器 手動式圧注入調節装置（JMDNコード：13100001）

インフスタット

再使用禁止

【警告】

輸液バッグ内に空気が認められる場合は十分抜いてからご使用ください。


【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 再使用禁止。（本品は使い捨て製品であり、再使用による機能低下のおそれがある）
2. 送気球以外の方法（電動ポンプ、院内配管等）で加圧を行わないこと。（急激な加圧により、破袋など故障のおそれがある）
3. 300mmHgを超える加圧を行わないこと。（過剰な圧により、製品機能の低下及び破損のおそれがある）

【形状・構造及び原理等】

<形状>

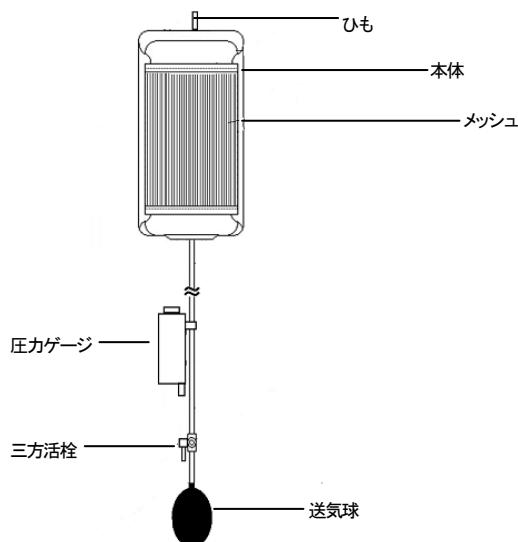

<材質>


本体、メッシュ、ひも：ナイロン
送気球：エチレンプロピレンゴム
圧力ゲージ：ポリプロピレン
三方活栓：ポリカーボネート
チューブ：ポリ塩化ビニル

【使用目的又は効果】***

輸液バッグに手動の送気球からの送気により圧力を加え、輸液の滴下を調整する。

【使用方法等】***

1. 本品を平らに置き、輸液バッグを本体とメッシュとの間に入れます。
2. 本体のリングを輸液バッグの穴に通し、平らに置いたまま三方活栓のつまみが3時の位置で、送気球を使い膨らませます。
3. 本体を膨らませ、生食バッグをしっかりとホールドした状態にした後ハンガーにかけ、加圧を続けます。
4. 適切な圧力となっていることを圧力ゲージで確認します。
5. 三方活栓のつまみを12時の位置に回し、圧力を維持させます。
6. 脱気するときは、三方活栓のつまみを6時の位置に回します。

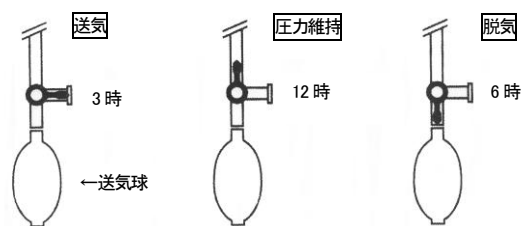

【使用上の注意】

- ・最大設定圧力300mmHgを超える圧以上に加圧されるとインジケータ部の安全弁が作動し、最大設定圧力まで自動的に減圧されます。
- ・空気が封入されていない輸液バッグをご使用ください。
- ・使用前、輸液バッグの脱気を必ず行ってください。

【保管方法及び有効期間等】***

1. 常温常圧下で保管すること。
2. 水のかからない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】***

製造販売業者：
株式会社 名優
〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2 **
TEL:047-480-6161 FAX:047-480-6162

製造業者：
The Metrix Company（アメリカ合衆国）