

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 排液バック 70308000

メリット ディスポーザル デュポット


再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

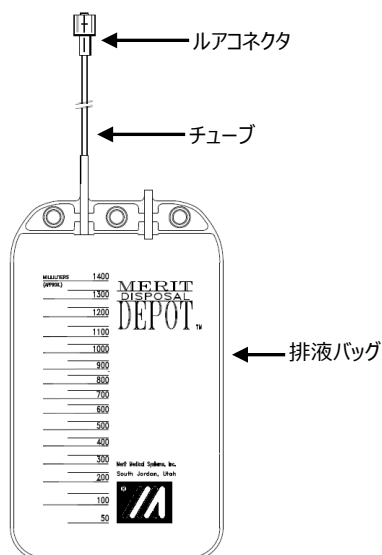

<形状>

カタログ番号	容量	仕様
MDD100	1400mL	オスルアコネクタ付
MDD110	1400mL	メスルアコネクタ付

<原理>

本品のルアコネクタにドレインチューブ又はカテーテルを接続し、自然落下により血液、空気、膿状分泌物を貯留する。

【使用目的又は効果】

本品は、ドレインチューブ等を接続するプラスチック製の排液バッグである。胸腔又は腹腔ドレインに接続し、血液、空気、膿状分泌物を除去するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

- 滅菌包装に破れ等の損傷がないことを確認し、無菌的に本品を取り出す。

- 本品に破損や不具合がないかを確認する。
- ルアコネクタにドレインチューブ等の末端を確実に接続する。
- 本品を患者より低い位置にあるように設置し、排液を貯留させる。
- 使用後はドレインチューブ等との接続を外す。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 本品を吊り下げる場合は、落下の恐れのない方法で、患者体位より低い位置に吊り下げる。[排液が逆流する恐れがある。]
- 使用中は排液の逆流や詰まりに十分注意する。
- バッグ方面に印刷された目盛りは目安である。目盛と実際の排液量はバッグの使用状態により異なる。
- 外から衝撃や圧力を加えない[漏れの原因となる恐れがある。]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本品に併用する医療機器を接続する場合は、確実に嵌合するものを選択する。また、使用中はドレインチューブ等との接続部分に漏れや緩みがないか適宜確認する。
- 界面活性剤又はエタノール等をコネクタに接触させないこと。[ひび割れの原因となる恐れがある。]
- 本品を鉗子等で強く挟まない。

<不具合・有害事象>

その他の不具合

- ・製品の破損及び漏れ
- ・チューブ接続部の外れ及び漏れ
- ・各部の閉塞

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

直射日光、水ぬれ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。

<有効期間>

製品包装に表示。[自己認証（自社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：メリットメディカル・ジャパン株式会社
 外国製造業者：Merit Medical Systems, Inc.
 国名：米国

