

機械器具 (48) 注射筒  
一般医療機器 汎用注射筒 13929001

# メリット RXP フラッシングシリンジ

## 再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

#### 使用方法

- ・造影剤等の高圧注入には使用しないこと。[液漏れ又は破損の可能性ある]
- ・再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

### <構造図>

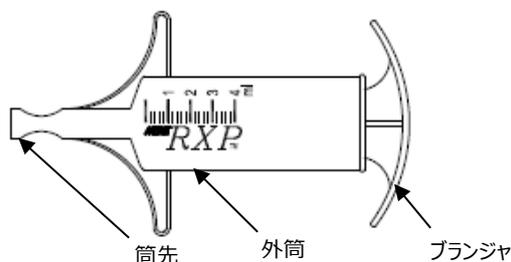

### <シリンジの容量>

製品番号	容量
RXPOR	4mL

容量精度：±5%

### 【使用目的又は効果】

液体又はガスを注入するか吸引するために用いる器具である。プラスチック製で目盛付の外筒、筒先、及びプランジャから成る。

### 【使用方法等】

1. 滅菌包装に破れ等の損傷がないことを確認し、無菌的に本品を取り出す。
2. 製品に破損や不具合がないかを確認する。
3. 吸引する場合は、必要な位置までプランジャを引き、そのまま保持する。
4. 注入する場合は、まっすぐにプランジャを押す。

### <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 予め他の医療機器等との接合部に緩みがないことを確認し、使用する。[本品の破損等により、破損部から液漏れの可能性がある。]
2. 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]
3. 外筒の目盛を超えてプランジャを引くと、プランジャが外筒から外れる可能性があるため、注意すること。
4. プランジャはまっすぐに引くこと。[斜めに引くとピストンシールと外筒の密着性が悪くなり、液漏れ、空気混入又はピストンシールの外れが生じる可能性がある。]
5. 本品は、カテーテル挿入前に、カテーテルに生理食塩水等を注入し、ガイドワイヤ等の挿入を容易にするために用い、他の用途には使用しないこと。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

使用前に包装に破損等がないこと、及び製品に不具合がないことを確認すること。

#### <不具合・有害事象>

本品の不適切な使用により、以下のような不具合・有害事象の可能性がある。

- ・漏れ、先端の外れ、空気混入、組織の損傷、感染

### 【保管方法及び有効期間等】

#### <保管方法>

直射日光、水ぬれ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。

#### <有効期間>

製品包装に表示 [自己認証 (自社データ) による]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：メリットメディカル・ジャパン株式会社

製造業者：Merit Medical Systems, Inc.

国名：米国