

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

※※2017年 5月 改訂（第7版）（新記載要領に基づく改訂）
※2014年 6月 改訂（第6版）

承認番号 20100BZZ01338000

機械器具80 はり又はきゅう用器具
管理医療機器 滅菌済み鍼 JMDNコード 34175000

スポールバン®

再使用禁止

※※【禁忌・禁止】

1. 使用方法
再使用禁止
2. 適用対象（患者）
 - 1) 妊婦 [陣痛を誘発するおそれがある]
 - 2) ニッケル及びクロム等のステンレス成分に対する金属アレルギーを有する患者
 - 3) 心臓ペースメーカー等体内植込型医用電子機器を装着している患者 [機器の作動に影響を及ぼすおそれがある]

※【形状・構造及び原理等】


スポールバンは、酸化鉄粉末成型板（圧粒子）の中央に小さな穴をあけ、そこからハリ先（鍼長1.1mm、線径0.22mm）を出してテープで固定した鍼治療器具です。

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みです。

ハリ（円皮鍼）：ステンレス鋼線

酸化鉄粉末成型板（圧粒子）：酸化鉄酸化バリウム

布バンテープ：アクリル系粘着剤を塗布した布

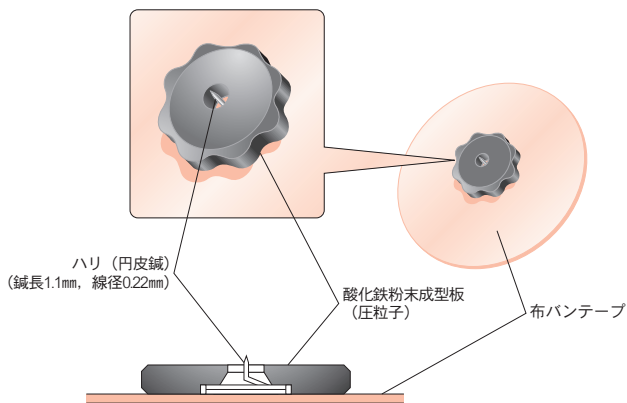

※※【使用目的又は効果】

鍼治療に使用すること

※※【使用方法等】

1. 皮膚の汚れや汗をふきとり清潔にご使用ください。
（できれば、市販の消毒薬で消毒してください。）
- ※ 2. 包装袋を開封し、ハリ先保護材（発泡体）と共に本品を取り出し、離型紙（ライナー）の切込みにそって布バンテープをはがして、ハリ先に触れないようにご使用ください。
3. コリや痛みのあるところを指で押さえ、特に痛みや不快感のある箇所を中心にはってください。
4. 皮膚面に直角に正しくはってください。
5. 2～3日毎に、わずかに場所をずらして、新しいものとはりかえてください。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

1. 本品は分解しないでください。衛生上の問題、ハリの紛失、小児の誤飲等の原因となります。
2. 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受け、指示に従ってください。
3. 入浴時は、貼付箇所をタオル等で強くこすらないでください。はがれたりケガの原因になることがあります。入浴後、はがれていないことを確認してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本品は、使い捨て製品であるので、1回限りの使用のみで再使用しないでください。
 - ※ 2) 開封後は無菌状態が保てませんので、使い切るようにしてください。
 - ※※ 3) 傷・湿疹等のある箇所を避けてください。
 - 4) 本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
2. その他の注意
 - 1) 使用後はハリがむき出しにならないよう布バンテープを折り中央部を包み、不燃物として廃棄してください。
 - 2) 公衆浴場等やプールでは、使用を中止してください。

※※【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
小児の手の届かない所に保管してください。
2. 有効期間
5年（自己認証による）
使用期限は外箱に記載

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：⊕ 祐徳薬品工業株式会社
住 所：〒849-1393 佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1
T E L：0954-63-1231(代)
製造業者：⊕ 祐徳薬品工業株式会社