

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

※2022年4月改訂(第4版)

認証番号 228ADBZX00027000

※2020年6月改訂(第3版)

医療用品 4 整形用品
管理医療機器 家庭用創傷パッド JMDN コード A71025000

カットバン®リペアパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

再使用禁止

2. 適用対象(患者)

- 1) 感染が見られる傷(例:発赤, 膿の滲出, 発熱, 腫れ, 悪臭などの異常が認められる傷) [感染を悪化させるおそれがある。]
- 2) 次のような傷 [感染を起こすおそれがある。]
 - (1) 深い刺し傷や, 筋肉・骨・腱が見えるような深い傷
 - (2) ガラス・木片・砂・ほこり・衣類の繊維など異物が入り込んだ傷
 - (3) 動物等に咬まれた傷
 - (4) 怪我をしてから時間が経った傷および, かさぶたがすでにできている傷


※【使用方法等】

本品は通常の救急絆創膏とは異なりますので、使用方法を確認して正しくご使用ください。

1. 貼り方

- ・貼付前に傷およびその周囲の皮膚を水道水などで洗浄し, 水気をよく拭き取って清潔にしてください。
- ・貼付前に適用部位の止血を行ってください。

- ① 個包装のあけ口(OPEN)をつかんでゆっくりと開封してください。
※本品を両手で約1分間温めると貼り付けた時に, 皮膚へのなじみがよくなります。

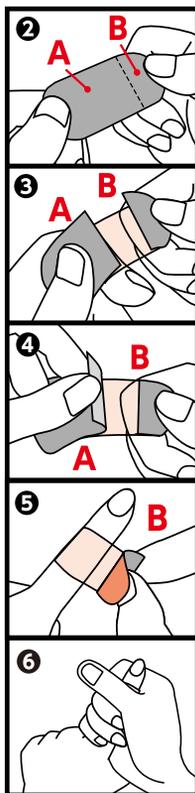

剥離紙を上面にし, 両手でお待ちください。
※大きい方を剥離紙A, もう一方(小さい方)を剥離紙Bとする。

本品を左右に軽く引っ張り, 剥離紙を製品から浮かせるように押し上げてください。

剥離紙Aを粘着部分に触れないようにつかみ, ゆっくりとはがしてください。


本品の中央に傷口があたるように貼り付け, 剥離紙Bをはがしてください。

本品の端をしっかりと皮膚に密着させ, 全体をなじませるように手で押さえてください。
※本品を傷にあてた後, 傷や傷口のまわりに, 均一に, そして確実に密着するように, 本品を上から手のひらで約1分間押さえて温めてください。

※【形状・構造及び原理等】

本品は吸収層であるハイドロコロイドパッドと背面の剥離紙から構成され, 滅菌紙で個包装されています。ハイドロコロイド素材は創傷からの体液(滲出液)を吸収・保持し, その部分がゲル状に白くふくらみ, 治癒に適した湿潤環境を整えます。体液(滲出液)は細胞の成長や再生を促す因子=「傷を治す成分」を含み, 傷の治癒に重要な役割を果たしています。

注:ハイドロコロイド素材は, 水分を吸収すると色が白く変わってふくらみますが, 製品の異常ではありません。また, 本品を貼付した部分が発汗した場合, 水分を吸収してハイドロコロイドが白くなる場合があります。本品の端まで白くなった場合はすみやかに新しいものに貼り替えてください。傷が治るにしたがい体液の分泌が減っていくため, 貼り替えるたびに白くふくらみは小さくなります。

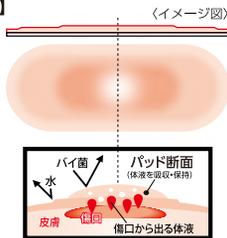

≪規格≫

種類	サイズ	入数
ふつうサイズ	25mm×60mm	12枚
大きめサイズ	30mm×70mm	8枚
スポットサイズ	20mm×30mm	10枚
ジャンボサイズ	55mm×60mm	4枚

※【使用目的又は効果】

軽度の切り傷, 擦り傷, 刺し傷, かき傷, あかぎれ, さかむけ, 靴ずれ等の創傷や軽度の熱傷を保護し, 湿潤環境を維持することにより痛みや軽減や治癒の促進を図る。

1日に1回は傷の状態を観察し, 感染(例:発赤, 膿の滲出, 発熱, 腫れ, 痛み, 悪臭など)が認められる場合は, 直ちに使用を中止し, 医師に相談してください。

2. はがし方

本品の端を軽く横に何回か引っ張り、ゆっくりはがしてください。はがれにくい場合は、温水を皮膚と本品との隙間に流し込むようにするとはがれやすくなります。出血させたり、再生した皮膚を取り除いたりしないよう注意してはがしてください。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・傷に塗布する軟膏・クリーム等の殺菌・消毒剤を本品と併用しないでください。使用した場合は水道水等で残さないようによく洗浄してください〔不必要な消毒は傷の治りを遅くすることがある〕。
- ・引っ張った状態で貼付しないでください〔皮膚障害（発赤、発疹、痒み、水疱、表皮の剥離など）やはがれの原因となるおそれがある〕。
- ・指などに貼り付ける際はきつく巻かないように注意してください。
- ・本品を切って使用しないでください〔本来の性能を発揮できないおそれがある〕。
- ・傷より大きいサイズの製品を使用してください。
- ・体液（滲出液）が多く、貼り付けた本品から漏れたり、汚れたりした場合は、本品をはがし、傷を水道水などでよく洗浄してから新しいものに貼り替えて、傷口を清潔に保ってください。
- ・ハイドロコロイドが体液（滲出液）を吸収しきれない状態が続くと、浸軟（ふやけ）を起こす場合があります。浸軟した状態で本品をはがすと表皮剥離を起こす場合があります。最長5日間の連続貼付が可能ですが、感染の症状が認められた場合は直ちに使用を中止してください。

***【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 次の部位には使用しないでください。
 - (1) にきび、湿疹、虫さされ、皮膚炎などの症状およびそれらをかきむしった傷〔症状や傷の悪化、発熱、治癒の遅れのおそれがある〕。
 - (2) 目の周辺や粘膜〔はがすときに組織を傷つけるおそれがある〕。
- 2) 次の人は本品使用前に医師または、薬剤師に相談してください。
 - (1) 糖尿病や血行障害の治療を受けている人
 - (2) 絆創膏等によりかぶれやすい人や、アレルギー体質の人
 - (3) 強い倦怠感を感じたり、発熱を感じたりするなど全身の状態がよくない人

3) 次の場合は使用を直ちに中止し、医師の診療を受けてください。

- (1) 本品の使用により傷の悪化、化膿、感染、傷の治りが悪い等の症状があらわれた場合
- (2) 数日間使用しても傷の治癒や改善がみられない場合または、悪化した場合
- 4) 出血を伴う熱傷（やけど）、患部が白や黒に変色し、感覚が無い重度の熱傷の可能性のある傷に対しては、安全性・有効性が確認されていません。
- 5) 本品は滅菌済みで、包装の破損等がない限り無菌性は保証されますが、包装に破損または汚損が認められたときは使用しないでください。
- 6) 本品は強いこすれや、過度の発汗、運動による隙間の発生、水仕事、入浴またはプールなどで皮膚がふやけた場合には剥がれやすくなる場合があります。
- 7) 患部の状態や個人の体質によっては、治癒後色素沈着や傷跡が残る場合があります。
- 8) 個包装開封後は、直ちに使用してください。
- 9) 製品にくぼみやムラがみられることがありますが、製造過程で生じるもので品質上問題ありません。
- 10) 茶色っぽい小さな点は原料由来のもので品質上問題ありません。

2. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- 1) 2歳以下の乳幼児には使用しないでください〔本品の粘着剤により皮膚を傷つける可能性がある。また、乳児が誤飲するおそれがある〕。
- 2) 3歳以上の幼児・小児に使用させる場合は保護者の監督のもと使用してください。
- 3) 授乳傷には使用しないでください〔乳児が誤飲するおそれがある〕。

***【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 1) 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
 - 2) 乳幼児・小児の手の届かないところに保管してください。
2. 有効期間
製造より4年間（自己認証による）
3. 使用期限
 - 1) 個箱の底面に記載（西暦年月／製造番号）
 - 2) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：☎ 祐徳薬品工業株式会社
製造業者：新タック化成株式会社

【お問い合わせ窓口】

祐徳薬品工業株式会社 お客様相談窓口
〒849-1393 佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1
TEL 0954-63-1320
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

「カットバン」は祐徳薬品工業(株)の登録商標です。