

きりきず
すりきず
靴ずれに

指定医薬部外品

1サイズ30枚入



●水に強い！

救急絆創膏

伸 縮 絆

SHINSYUKUBAN



KOKANDO CO.,LTD.



使用期限

2025. 03

製造記号

22040

もろ
水に強い伸縮布タイプ



200101 (A)



押して開ける

伸縮絆

SHINSYUKUBAN

効 能
を傷、靴すれ、
成 分
クリノール水
用 法

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

不織布10g中 日本薬局方アクリノール水和物……………40mg

被覆してある両側の保護用被覆物をはぎ、中央のパッドに触れないようにして、パッドが傷口を保護するようにはり付ける。

〔用法・用量に関する注意〕

(1)患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。
(2)粘着面を患部に貼らないでください。(3)パッド部分が濡れたり、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させていただきます。
(5)使用後はがす時は、患部やまわりの皮膚をいためないようにゆっくりとがしてください。ヨードパッド部分に使用しているアクリノール水和物の消費効果を弱めるので、ヨードペンと同時に使用しないでください。

▲[使用上の注意]

 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

保管及び取扱上の注意

1. 使用に際しては、この面に記載の事項をよく読んでください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

阿蘇製薬株式会社
お客様相談窓口 096-232-3933
9:00～17:00まで(土・日・祝日を除く)

販売名 伸縮絆

19mm×72mm 30枚入

廣 貫 堂 株式會社 元 売 發

富山市梅沢町2丁目9-1

製造販売元 阿蘇製薬株式会社

熊本県菊池郡菊陽町津久礼91-1

指定医薬部外品

水に強い伸縮布タイラ

24

每
壽
終

救急絆創膏

紙

個包裝
箱

廣貫堂
伯繡經M-30