

救急絆創膏

半透明タイプ

きず



4

954097393025

231001 A



M003

効果

すり傷、切り傷、
さし傷、かき傷、
靴さし、創傷面の
殺菌・消毒・保護

押して開ける

用法

被覆してある両側のセパレータをはざ
とりのパッドに貼れないようにして、パッド
が傷口を保護するように貼り付けてくだ
さい。

用法及び用量に関連する注意

- (1) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さない
よう注意して使用してください。
- (2) 粘着面を患部に貼らないでください。
- (3) パッド部分が濡れたり、又は汚れたまま
放置すると傷の治りが悪くなります
ので、貼り替えてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指
導監督のもとに使用させてください。
- (5) 使用後はがす時は、患部やまわりの皮
膚をいためないようにゆっくりとはが
してください。
- (6) この製品はパッド部分にアクリノール水
和物を使用しています。消毒効果を弱め
るので、ヨードチンキと同時に使用しない
でください。

使用上の注意

★相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたこ
とのある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、こ
の箱を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください。
使用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

保管及び取扱上の注意

- (1) 際際に際しては、この箱に記載の事項をよく読んでください。
- (2) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。

〈実物大〉

特長

この救急
バンは、
消毒成分
アクリノール水和
物含有し、傷口
を消毒・保護する
救急絆創膏です。

傷口を痛めにくい
特殊ネット使用

製造販売元

阿蘇製薬株式会社
熊本県菊池郡菊池町津久礼9-1

お登録相談窓口

03-6422-3365
(土・日・祝日を除く)
9:00~17:00まで

発 売 元

株式会社 廣 賢 堂
富 山 市 海 町 2 丁 目 9-1

販売名：デルカットバン
成分・量：ワット中 日本薬局方アクリノール水和物 0.4%
19mm×72mm 18枚入
日本製

きず

救急絆創膏

半透明タイプ

1サイズ

18
枚入

✓ きりきず
✓ すりきず
✓ 靴ずれに

●半透明タイプ

指定医薬部外品

1サイズ

18
枚入目立たない
半透明タイプ

救急絆創膏

デルカットバン

D E R C U T B A N



KOKANDO CO., LTD.

個包装
箱

使用期限

製造記号