

レンズがするっと眼になじむ

眼潤[®]

Gan Jun

天然うるおい成分
ヒマシ油配合

‘TORAY’

12mL

ハードコンタクトレンズ専用装着液

眼潤使用説明書



ハードコンタクトレンズ専用装着液 指定医薬部外品

販売名: 眼潤 ハードレンズ用

- ご使用前には、必ずこの使用説明書をよく読み、表現や内容等でわからないことがあれば必ず医師又は薬剤師に相談し、よく確認してからご使用ください。
- この使用説明書は大切に保管してください。
- この使用説明書に記載された事項は必ずお守りください。
- 本剤使用により少しでも異常を感じたら、直ちに医師又は薬剤師にご相談ください。
- コンタクトレンズの取扱いについてはレンズの添付文書をよく読み、その使用方法などをお守りください。
- コンタクトレンズを取り扱う前に、よく手を洗い清潔にしてください。

特長

- ポリビニルアルコール(部分けん化物)配合
瞳とレンズのクッションの役割となり、レンズがするっと眼になじみ、装着時のゴロゴロ感をやわらげます。
- 天然うるおい成分ヒマシ油配合
「眼潤」は涙の油層に着目し、天然うるおい成分ヒマシ油を配合することで本来の涙より近い装着液となっています。
眼を覆っている涙の表面には、ごく薄い油の層が存在しています。油層は、水分の蒸発を防いでいます。



角膜矯正用コンタクトレンズ「プレスオーコレクト」にも使用できます。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。…はげしい目の痛み

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って
医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能・効果

ハードコンタクトレンズの装着を容易にする。

用法・用量

本剤の1～2滴で、ハードコンタクトレンズの両面をぬらして装着してください。



〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をコンタクトレンズ、指に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) ハードコンタクトレンズを装着するときのみ使用してください。
- (5) 用法・用量を厳守してください。

成分及び分量 (1mL中)

〔有効成分〕

有効成分	分量
塩化ナトリウム	5mg
ポリビニルアルコール(部分けん化物)	15mg

〔添加剤〕

塩化カリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素ナトリウム、クロルヘキシジングルコン酸塩、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、ヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸ナトリウム水和物

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側に白くつくことがあります。そのような場合には、清潔なガーゼ等で軽く拭き取ってご使用ください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用してください。
- (7) 容器に他のものを入れて使用しないでください。
- (8) コンタクトレンズケア用品に混ぜて使用しないでください。

本剤の容器は、透明フィルムで密封包装されています。フィルム破れ等の不審な点が見られた場合は、シードお客様相談室(シードひとみコール)へご連絡してください。

お問い合わせ先

販売について：シードお客様相談室(シードひとみコール)

0120-317103

受付時間／9:00～17:00 ※土日・祝日・年末年始等を除きます。

製品について：テイカ製薬 お客様相談係

076-431-8863

受付時間／9:00～17:00 ※土日・祝日・年末年始等を除きます。

販売業者：東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町 2-1-1

株式会社シード 東京都文京区本郷 2-40-2

製造販売業者：テイカ製薬株式会社 富山県富山市荒川 1-3-27